


Instructie dragen van een mondneuskapje

Voor preventief gebruik, gebruiken we mondneuskapjes type IIR, mondneuskapjes type FFP2 worden hiervoor niet gebruikt

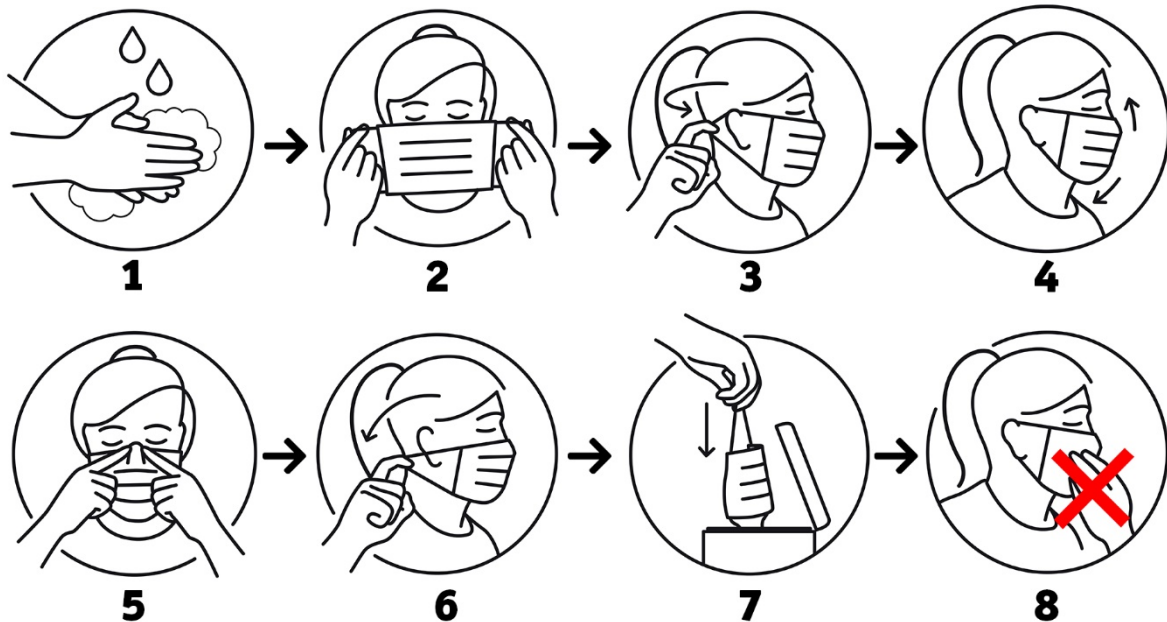

Toelichting:

Bij 1: Handhygiëne: wassen of desinfectie, minimaal 20 seconden wassen (plaatje 1)

Bij 2: Vastpakken bij de elastieken en plaatsen om oren (verder niet aanraken).

Buitenzijde van het mondneuskapje is de kant waar de vouwen naar beneden wijzen.

Bij 5: **Zorg voor goede aansluiting om gezicht en druk neusklem aan**

Bij 6: Mondneuskapje afdoen door alleen elastieken vast te pakken

Bij 7: Gooi in de afvalbak en verder niet aanraken

Bij 8: Niet meer aanraken na het plaatsen (plaatje 8)

En verder:

- Draag een mondneuskapje maximaal 3 uur
- Mondneuskapje niet af- en opzetten om te eten of te drinken
- **Raak het mondneuskapje zo min mogelijk aan.** Vervang mondneuskapje als het is aangeraakt, nat is geworden of af is gedaan
- Mondneuskapje niet opnieuw gebruiken nadat het is afgedaan. De buitenkant en binnenkant van het mondneuskapje kan besmet zijn geraakt. Draag het mondneuskapje niet tussendoor op/onder je kin, aan je oor, pols of op je hoofd maar gooi het weg in de afvalbak

De 1,5 meter maatregel blijft ook in stand bij het dragen van een mondneuskapje